



## Краснодарская краевая общественная организация «Центр социальной помощи и защиты прав граждан «Филантроп»

353915, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Революции 1905 года, д.6  
ИНН: 2315980290 КПП: 231501001  
Тел.: +7 918 1919 918 E-mail:kkoo.filantrop@mail.ru www.filantrop.club

### ПРИКАЗ № 008-тср

01.11.2025г.

#### Об утверждении стоимости технического обслуживания и ремонта технических средств реабилитации

На основании произведённых расчётов утвердить стоимость ТО (технического обслуживания) и ремонта ТСР (технических средств реабилитации, инвалидных колясок) с 01 ноября 2025г. согласно нижеприведённому списку. Работы производить в соответствии с утверждёнными технологическими картами (Приложения к Приказу).

№	Наименование работ	Стоимость (руб.) для ТСР сторонних лиц и организаций	Стоимость (руб.) для ТСР ссудополучателей собственного фонда
1.	ТО на дому (в соответствии с техническим паспортом изделия, не менее 1 раза/квартал)	1000-00	0-00
2.	Ремонт в мастерской (по заявкам ссудополучателей или сторонних организаций):	От 1000 руб. в зависимости от сложности	0-00
2.1.	Устранение прокола шины колеса (замена камеры*)	800-00	0-00
2.2.	Замена поломанной спицы*	1000-00	0-00
2.3.	Устранение деформации обода колеса*	1500-00	0-00
2.4.	Замена тормозных колодок (без стоимости колодок)*	1000-00	0-00
2.5.	Сборка нового колеса (без учета замены шины) *	1500-00	0-00
2.6.	Замена тормоза, включая регулировку*	1200-00	0-00
2.7.	Разборка/сборка заднего/переднего колеса	1200-00/800-00	0-00
2.8.	Замена втулки колеса*	1400-00	0-00
2.9.	Переборка втулки	1000-00	0-00
2.10.	Нарезка резьбы	1000-00	0-00
2.11.	Другие работы в мастерской, не учтённые в списке по согласованию с Заказчиком	От 1000-00	0-00

\*Стоимость запасных частей взымается с заказчика отдельно. За исключением запчастей приобретённых за счёт средств грантодателей или благотворителей (информировать о наличии до оформления заказа на ремонт).

Директор



А.О.Рыбкин



# Краснодарская краевая общественная организация «Центр социальной помощи и защиты прав граждан «Филантроп»

353915, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Революции 1905 года, д.6

ИНН: 2315980290 КПП: 231501001

Тел.: +7 918 1919 918 E-mail:kkoo.filantrop@mail.ru www.filantrop.club

Утверждено

Приложение №1 к Приказу №008-тср от 01.11.2025г

Регламент планового технического обслуживания кресел-колясок на дому.

## Ежеквартальное техническое обслуживание

№	Возможные неполадки и дефекты	Устранение дефектов
1.	Крепёжные болты и шурупы: ослабление	Подтянуть болты и шурупы
2.	<b>Задние колёса:</b>	
2.1.	Скрип и скрежет, неровное вращение («восьмёркой»)	Подтянуть крепёж
2.2.	Натяжение спиц	Подтянуть спицы
2.3.	Проверка втулки легкосъемных колес на снятие и возвращение на место со щелком	Очистить от грязи и смазать
2.4.	Место крепления втулки к раме	Очистить от грязи и смазать.
3.	<b>Передние колёса:</b>	
3.1.	Раскачивание из стороны в сторону	Возможно, ослабли болты крепления колеса - подтянуть
3.2.	Наматывание волос, ниточек, пушинок и т.д.	Очистить механизм
4.	<b>Шины:</b>	
	Давление в шинах	Проверить и подкачать до нужного, согласно паспорту
5.	<b>Тормоза:</b>	
5.1.	Ослабление тормозного механизма	Подтянуть и смазать

## Полугодовое техническое обслуживание

№	Возможные неполадки и дефекты	Устранение дефектов
1.	Работы, согласно ежеквартальному техническому обслуживанию	
2.	Опорная крестовина складной коляски	Смазать

## Годовое техническое обслуживание

№	Возможные неполадки и дефекты	Устранение дефектов
1.	Работы, согласно полугодовому техническому обслуживанию	
2.	Шарниры колёс	Смазать



**Краснодарская краевая общественная организация  
«Центр социальной помощи и защиты прав граждан «Филантроп»**

353915, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Революции 1905 года, д.6

ИНН: 2315980290 КПП: 231501001

Тел.: +7 918 1919 918 E-mail:kkoo.filantrop@mail.ru www.filantrop.club

Утверждено

Приложение №2 к Приказу №008-тср от 01.11.2025г

**Регламент дефектации и ремонта кресел-колясок с ручным приводом в мастерской.**

<b>№</b>	<b>Возможные неполадки и дефекты</b>	<b>Устранение дефектов</b>
1	<b>Рама:</b>	
1.1.	Наличие ржавчины, трещины	Дефектация, ремонт, при необходимости - замена
2	<b>Задние колёса:</b>	
2.5.	Неровное вращение («восьмёркой»)	Дефектация, ремонт, при необходимости - замена
2.6.	Погнутые и повреждённые спицы	Замена
3	<b>Передние колёса:</b>	
3.3.	Раскачивание из стороны в сторону	Дефектация, ремонт, при необходимости – замена подшипников
4	<b>Шины:</b>	
4.1.	Спущеные шины	Дефектация, ремонт
4.2.	Вздутия, трещины	Замена
5	<b>Обивка:</b>	
5.2.	Разрывы, провисание	Замена